

# フェイスシールドマスク（透明マスク） 顔の保護・飛沫防止用等の効果があるフェイス透明マスクのご案内

正面画像



側面画像



背面画像



天面画像



下記の組立作業を行ってからご使用ください。

## 組立作業方法

①本体とスポンジ部品で1セット



②本体裏の保護シートを剥がします。



③スポンジ裏の紙を剥がします。



紙を剥がすと糊が付いています。

④本体にスポンジを貼ります。



紙を全て剥がしたら本体裏面の印刷が有る部分にスポンジを貼れば完成です。

\*斜めに貼らないようご注意ください。

保護シートを全て剥がすと透明度が良くなります。必ず剥がしてください。

# フェイスシールドマスク（透明マスク）

## ▪ 使用方法

本体にスポンジを貼って組立してから使用して下さい。

- ①スポンジをおでこにあてて下さい。
- ②平ゴムを頭の後ろに通して固定して下さい。
- ③固定したらご自身で上下・左右の方向を調整して下さい。




## ▪ 特徴

P E T樹脂を使用しております。  
P E T樹脂なので透明性はとても良いです。  
スポンジが付いているのでおでこにやさしく、装着後は安定します。  
会話した時に本体が極力曇りにくい処理をしています。

## ▪ 包装形態

本体製品 + スポンジ（裏面糊付） / 袋入

## ▪ 製品寸法

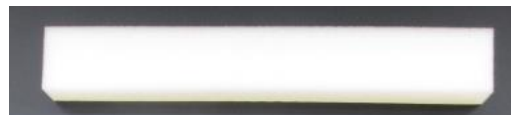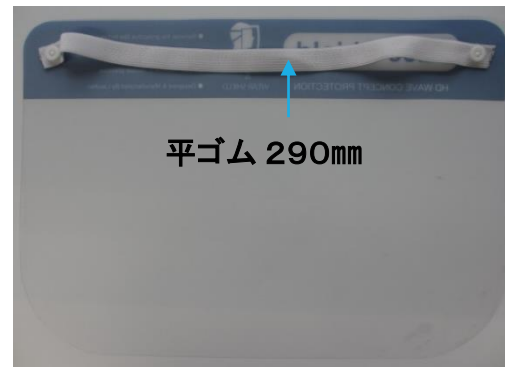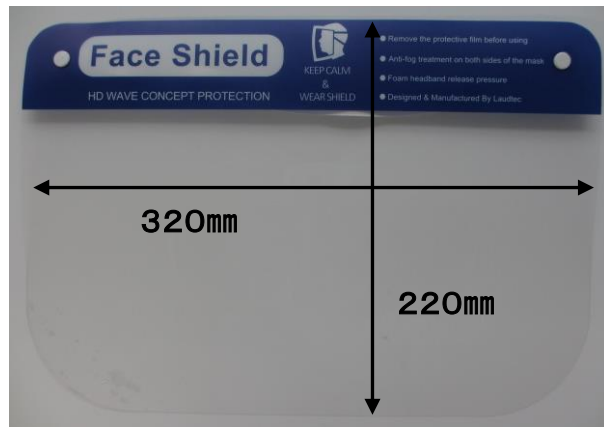

スポンジ寸法 約縦 33mm × 横 230mm × 厚み 20mm

## ▪ サイズ

本体 320mm × 220mm

平ゴム 約290mm

スポンジ 約33mm × 約230mm × 約20mm

## ▪ 素材

P E T 0.25mm厚

\*裏面に保護シート付  
防曇処理有

## ▪ 梱包

100枚 / 段ボール入

\*組立説明書は段ボールの中に1枚入

## ▪ 生産国

中国製